


>> SUAP-FM-36

Simulateur défibrillateur «Lifepak Trainer 1000»



Définition / Description

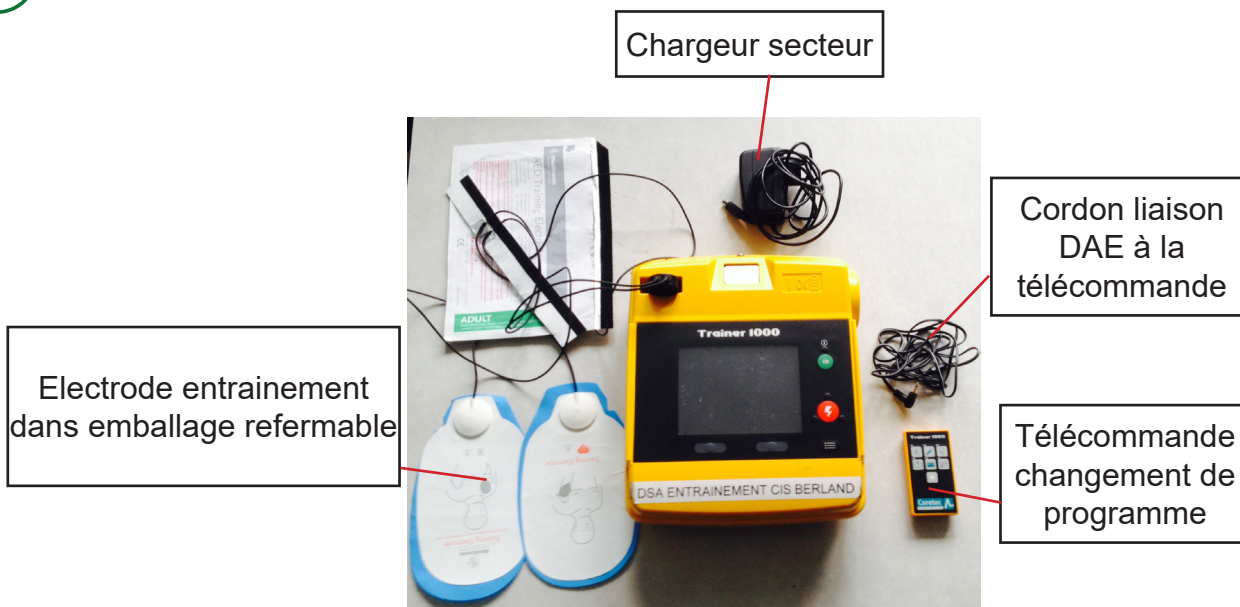


Touches et fonctions de télécommande :

F1 : cette touche n'est active que pendant les messages (appuyer pour analyse ou analyse en cours, reculez ! modification par « **pas de choc conseillé** »)

F4 : un appui sur cette touche pendant l'analyse l'appareil délivre le message « **mouvement détecté** »

F5 message « **batterie faible** »

F2 : En appuyant sur cette touche le message « **appel service** » est délivré, éteindre le DAE ou appuyer sur cette touche pour mettre fin à cette fonction

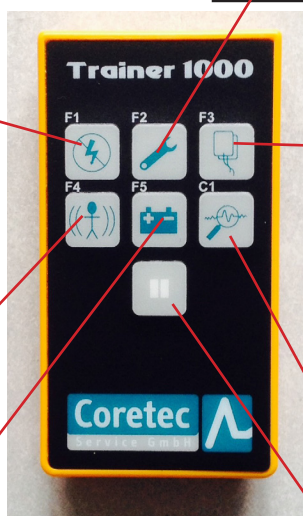

F3 : démarrage ou arrêt de l'appareil puis message « **connecter les électrodes** » cette fonction n'est active que si les électrodes sont raccordées à l'appareil
F3 (appui long) : Lancer un programme

C1 : touche inactive

Touche pause

Programme

Pour accéder à cette fonction il faut d'abord appuyer sur la touche « pause » puis ensuite sélectionner le programme choisi sur les touches de F1 à F5 sur la télécommande

Touche télécommande	Protocole trainer	Séquences de chocs
F1	Séquence fixe N°1	SSSSK
F2	Séquence fixe N°2	KKKK
F3	Séquence fixe N°3	SSKKKK
F4	Séquence fixe N°4	SSKSSK
F5	Séquence fixe N°5	SKKK
C1	Spécial	*(Sou K)

S: choc conseillé K: choc non conseillé



Indications

Cet appareil permet de simuler la pose d'un DAE opérationnel



Risques et contraintes

Cet appareil n'est pas adapté à une utilisation sur l'homme



Utilisation

Cet appareil est exclusivement destiné à des fins de formation et doit être stocké de manière à ne pas pouvoir être confondu et à l'écart des défibrillateurs thérapeutiques. Fonctionne sur accus (autonomie 3h) ou sur secteur.



Entretien / Maintenance

Utiliser à l'abri de la pluie