

>> SUAP-FM-37

Drap de glisse



Définition / Description

Le drap de glisse (dispositif composé d'une pièce de tissu dont les deux extrémités sont cousues entre elles et qui forme un tube) est un dispositif qui facilite la translation ainsi que le rehaussement d'une victime allongée dans un lit ou sur un brancard. Il limite ainsi les maux de dos et les troubles musculo-squelettiques des sapeurs-pompiers.

L'effet de glisse (obtenu par frottement du tissu) facilite le travail de manutention en réduisant les frottements dus au poids du patient pendant les manipulations. Il est nécessaire de déplier complètement le dispositif pour l'utilisation.



Indications

- Pour le passage de la victime d'un lit au brancard.
- Pour le passage de la victime de brancard à brancard.
- Pour la mobilisation de la victime en translation horizontale ou verticale (remontée de la victime dans son lit ou sur le brancard).



Utilisation



- Tourner légèrement la victime et engager le drap de glisse sous le drap ou directement sous la victime (au niveau du torse et du bassin).



- Positionner le brancard d'accueil (ou autre dispositif) au même niveau que la victime.



- Le transfert s'effectue à l'aide d'un ou de deux équipiers.
En fonction du positionnement du brancard d'accueil, ceux-ci tireront ou pousseront la victime ou le drap.



- Pour retirer le dispositif, retourner la victime et dégager le drap de glisse.



- Pour relever une victime sur le brancard ou dans un lit, engager le drap de glisse (dans l'autre sens) sous le dos de la victime.
2 équipiers (1 de chaque côté) remontent la victime vers le haut du brancard.



- Retirer le drap de glisse en soulevant délicatement la victime.



Risques et contraintes

Ne pas utiliser sur une victime présentant un traumatisme du rachis.



Entretien / Maintenance

Après chaque utilisation pulvériser du spray détergent désinfectant sur le drap de glisse et nettoyer l'ensemble.

Lavage en machine possible **en dessous de 60 degrés** puis étendre pour sécher.

ATTENTION :

- * Ne pas utiliser de sèche-linge.
- * Ne pas repasser.
- * Ne pas utiliser de chlore.