

>> SUAP-FTO-26

Nettoyage et désinfection complète du VSAV



Nombre d'équipiers



Matériel

- Des gants de ménage.
- Le produit détergent/désinfectant prêt à l'emploi (centrale de dilution).
- Des lavettes à usage unique.
- Les 2 seaux (rouge et bleu).
- L'aspirateur.
- Le balai réservoir pulse + 2 bandeaux de sol à usage unique.
- Un sac DASRIA.
- Un spray désodorisant



Indications

- Périodicité de la désinfection complète laissée à l'appréciation du chef de CIS en fonction de l'activité opérationnelle du centre (hebdomadaire ou mensuelle).
- Intervention à risque infectieux.
- Souillures importantes.






Réalisation


- Vider les poubelles
- Sortir le brancard, le recouvrir d'un drap propre et déposer l'ensemble du matériel de la cellule sanitaire dessus. Vider les tiroirs.



- Préparer un endroit propre à proximité (table par exemple).
- Se laver les mains et mettre des gants de ménage.
- Nettoyer tout le matériel (attelle, brancard, civière à aube....) et dispositifs médicaux lavables (brassard appareil à tension, aspirateur de mucosités...) : technique des 2 seaux. Ne pas rincer.
- Déposer le matériel propre sur l'endroit réservé à cet effet. Laisser sécher.
- Nettoyer l'ensemble de la cellule sanitaire (parois, tiroirs, plan de travail, siège, support brancard, ...) du haut vers le bas, du fond vers la sortie.

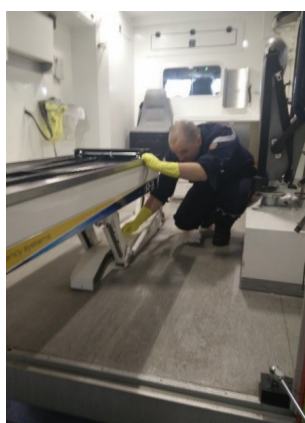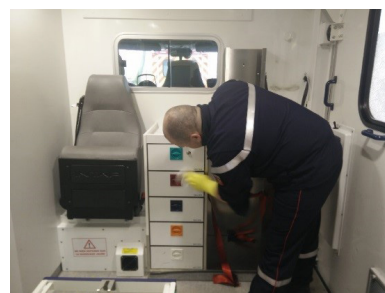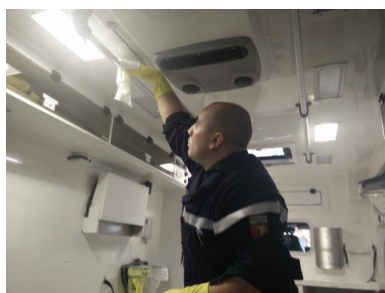

- Répéter l'opération dans la cabine : volant, tableau de bord, levier de vitesse, radio, ...
- Nettoyer les poignées de portes (intérieures, extérieures).

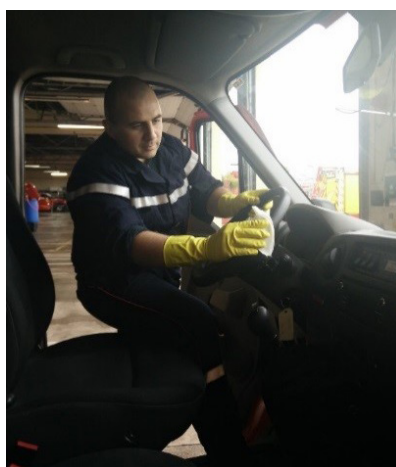

- Ne pas rincer. Laisser sécher.
- Vérifier les fluides et stock +/- péremption des dispositifs. Réapprovisionner en matériel si nécessaire.

- Procéder au nettoyage du sol.



- Fermer les portes de la VSAV.
- Vaporiser avec le spray désodorisant si nécessaire
- Nettoyer le matériel d'hygiène.
- Retirer les gants de ménage, les laver et faire sécher.
- Se laver les mains.