

>> SUAP-FTO-41

Pansement compressif d'urgence type «Israélien»



Nombre d'équipiers



OU



Matériel

- Compresse non adhérente 10cm x 18cm.
- Bande élastique à déroulement progressif.
- Applicateur de pression



Indications

Le pansement compressif d'urgence est utilisé en relai d'une compression manuelle efficace, lorsque la localisation le permet. Il peut venir en complément d'un pansement hémostatique de type QuikClot®.



1er
emballage

Pansement compressif
comportant 2 emballages

Applicateur de pression

2ème emballage

Compresse non adhérente



Justification

La pose d'un pansement compressif d'urgence permet :

- de libérer le secouriste tout en maintenant une pression suffisante sur la plaie qui saigne.
- d'arrêter l'hémorragie sans interrompre la circulation.



Réalisation



Après avoir réalisé une compression manuelle efficace, poser la compresse sur la plaie. Appliquer la compresse puis dérouler la bande élastique autour de la partie blessée.



Insérer la bande élastique dans l'applicateur de pression. Tendre la bande et passer le bandage par dessus l'applicateur de pression.



Dérouler la bande en sens inverse en repassant sur l'applicateur de pression. La bande doit recouvrir entièrement la compresse.

La bande doit être tendue de manière à arrêter l'hémorragie sans gêner la circulation.



Fixer la bande en insérant les clips de l'extrémité de la boucle de retenue entre les couches du bandage.



Vérifier l'efficacité du pansement compressif par l'arrêt du saignement. Vérifier la présence du pouls (à l'extrémité de la partie blessée).



Cas particulier

Dans certaines localisations de plaie en zone « non garrotable », il est parfois possible de réaliser un pansement compressif en prenant appui sur un relief osseux opposé.

Par exemple :

- cou avec contre-appui sur l'aisselle opposée;
- aisselle avec contre-appui à la base du cou côté opposé;
- fesse avec contre-appui sur le bassin;
- pli inguinal avec contre-appui sur le bassin;
- cuir chevelu avec contre-appui sur le menton.

Plaie hémorragique au niveau du cou

Dans le cas de plaie hémorragique du cou, un QuikClot® sera mis avant la mise en place du pansement compressif d'urgence.

Après la mise en place du QuikClot® faire une compression manuelle de 3 minutes puis appliquer la partie compressée (du pansement compressif d'urgence) sur la plaie hémorragique en maintenant une certaine pression.

Privilégier la position demi-assise ou assise afin d'améliorer la respiration. Allonger la victime en cas de saignement important avec trouble de conscience.

Tendre la bande en la faisant passer au niveau du creux axillaire opposé à la plaie du cou en levant le bras de la victime.

Faire passer la bande élastique du pansement compressif dans l'appliqueur de pression.

Tirer la bande en sens inverse afin d'obtenir une compression suffisante par arrêter le saignement. Vérifier l'arrêt de l'hémorragie. Si l'hémorragie est toujours active, exercer une tension plus importante sur la bande.



Poursuivre le déroulement de la bande entre la plaie et l'aisselle opposée en s'assurant de recouvrir la totalité de la plaie.



Finir de dérouler l'ensemble de la bande et fixer les extrémités.



Enfin, coincer l'emballage du pansement hémostatique QuikClot® dans le pansement compressif (si il a été utilisé).

Surveiller et réévaluer la victime en ayant une attention particulière au niveau des voies respiratoires.



—Points clés—

- Le pansement recouvre la plaie.
- Le bandage est suffisamment serré.
- L'applicateur de pression est bien positionné sur la plaie.
- Pour les plaies du cou, être attentif à l'évaluation de la respiration.



—Critères d'efficacité—

Correctement posé, le pansement d'urgence entraîne un arrêt du saignement mais pas un arrêt de la circulation.