



PREALABLE

Débranchez le boîtier de transfert
Attendre au moins 1 min
Rebranchez le boîtier



Transfert de données LP 1000 avec ICS2




1 Vérifiez que le boîtier ICS2 est prêt (ICS2 Ready affiché sur l'écran)



5 Attendez le message de fin (IRDA OK, FTP OK)



2 Alignez la LED Infra Rouge du LP1000 et la face noire du boîtier ICS2

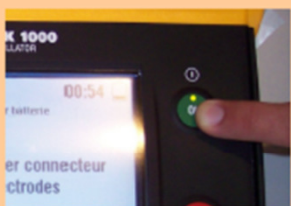

3 Allumez le LP1000



4 Le transfert se fait automatiquement.

Messages d'erreur

« IRDA OK, FTP Error » :

Les dossiers DSA sont bien stockés dans le boîtier ICS2 mais n'ont pas été transmis par FTP au serveur. Ils seront transmis automatiquement, dès que le serveur sera accessible.

« IRDA Error, FTP Error » :

Erreur de transfert entre le boîtier ICS2 et le DSA. Veuillez recommencer en vérifiant bien la distance entre le boîtier et le DSA (10 à 30 cm)

LP1000 est une marque déposée de Medtronic

IMARTEC Tel: 05 58 82 07 65 support: help@imartec.com



Mise à jour le 13/07/2017