


	<h1 style="text-align: center;">Tubulure aspirateur à mucosités avec stop vide</h1> <h2 style="text-align: center;">Stop vide pédiatrique</h2> <h3 style="text-align: center;">CAIR LGL</h3>	<p>Création : Novembre 2022</p>
	<p>Fiche matériel</p>	<p>Mise à jour Version 1 3/11/2022</p>

INDICATIONS

Relie la sonde d'aspiration à l'aspirateur de mucosités.
Permet l'activation ou l'arrêt manuel de l'aspiration des sécrétions


PRESENTATION

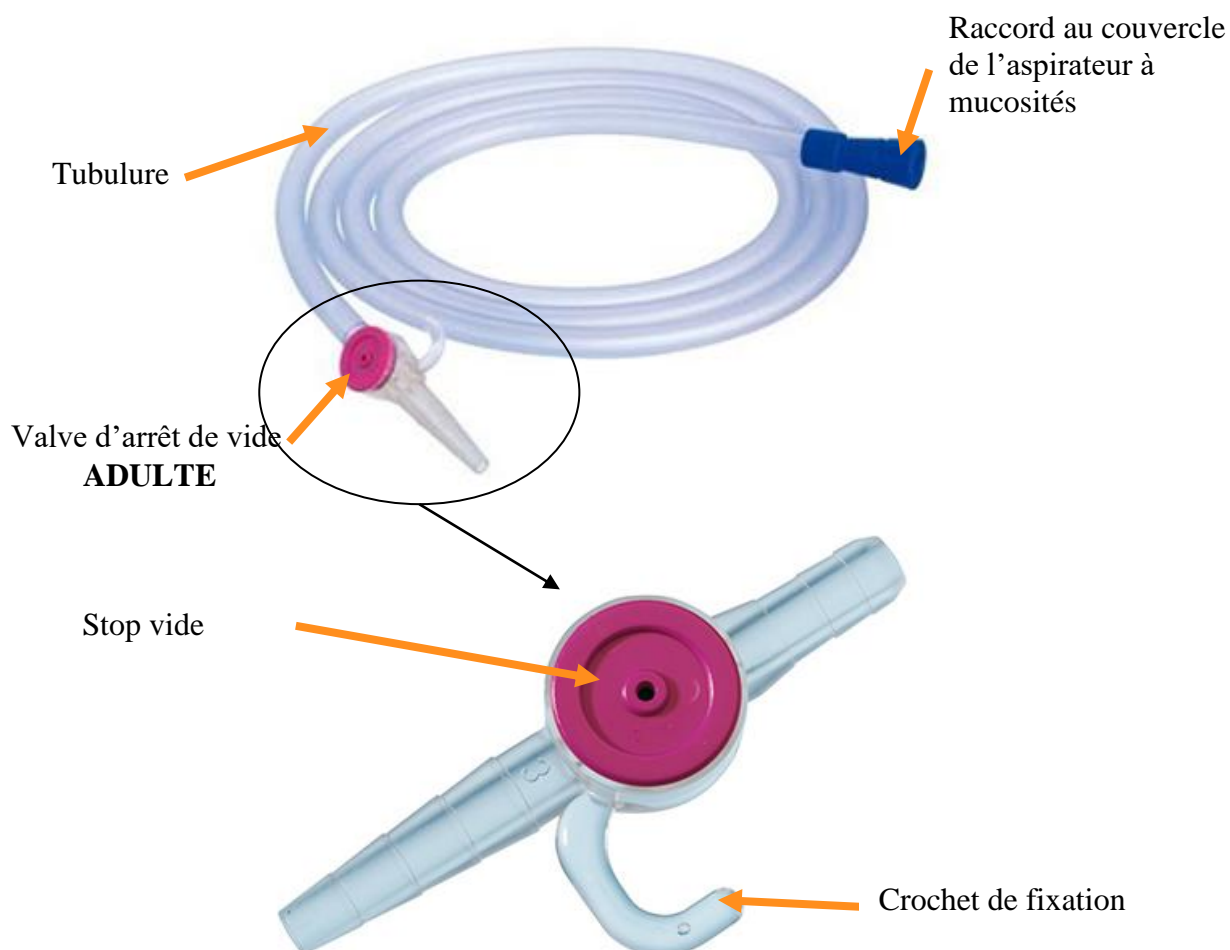

STOP VIDE PEDIATRIQUE (rangé dans le kit accouchement)

Embout pédiatrique

Stop vide

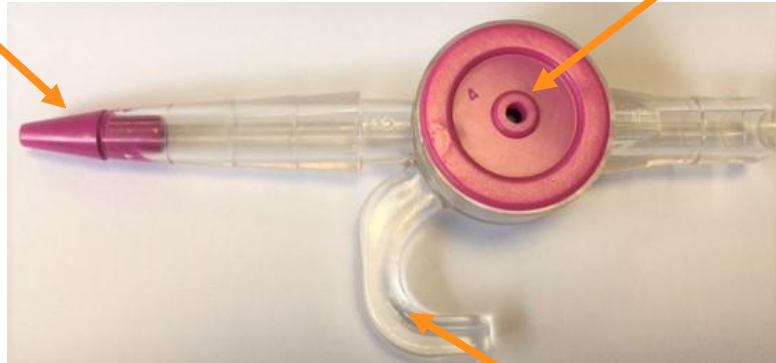

Crochet de fixation

REALISATION

Relier le godet à l'arrivée patient du bocal située sur le couvercle de l'aspirateur à mucosité

Réaliser un test de fonctionnement

Lors de l'utilisation en opérationnel,

- Chez l'adulte et l'enfant : utiliser la tubulure avec le stop vide adulte
- Chez le nouveau-né et le nourrisson : enlever le stop vide adulte de la tubulure et connecter le stop vide pédiatrique

Pour mettre en route l'aspiration, obturer le stop vide avec le doigt.

Pour arrêter l'aspiration, enlever le doigt du stop vide.

Si besoin, rincer la tubulure en aspirant du sérum physiologique ou de l'eau.

RANGEMENT

Tubulure adulte : 1 montée sur le LSU + 1 tubulure en réserve dans le tiroir bleu

Stop vide pédiatrique : 1 stop vide rangé dans le sachet zip du kit accouchement

ENTRETIEN/MAINTENANCE

Matériel à usage unique.

Eliminer la tubulure dans un conteneur DASRI


Effectuer un test de fonctionnement de l'aspirateur à mucosités après chaque changement de tubulure.

	Tubulure aspirateur à mucosités avec stop vide	Création : Août 2020
	Fiche matériel	Mise à jour Version 1

INDICATIONS

Relie la sonde d'aspiration à l'aspirateur de mucosités.
Permet l'activation ou l'arrêt manuel de l'aspiration des sécrétions

PRESENTATION

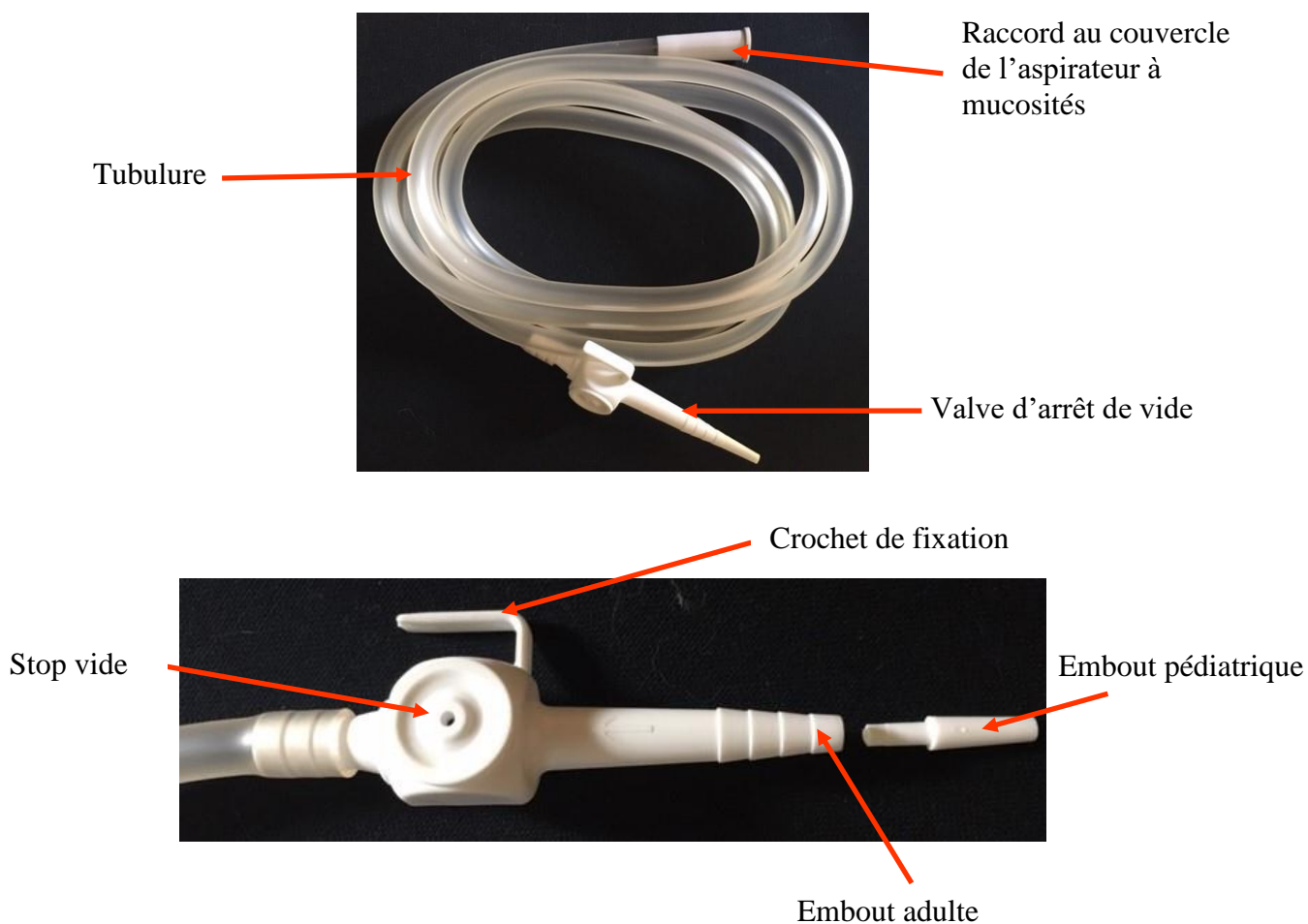

REALISATION

Relier le godet à l'arrivée patient du bocal située sur le couvercle de l'aspirateur à mucosité

Réaliser un test de fonctionnement

Lors de l'utilisation en opérationnel,

- Chez l'adulte : enlever l'embout pédiatrique en tirant et tournant l'embout
- Chez l'enfant utiliser tel quel

Pour mettre en route l'aspiration, obturer le stop vide avec le doigt.

Pour arrêter l'aspiration, enlever le doigt du stop vide.

Si besoin, rincer la tubulure en aspirant du sérum physiologique ou de l'eau.

ENTRETIEN/MAINTENANCE

Matériel à usage unique.

Eliminer la tubulure dans un conteneur DASRI

Effectuer un test de fonctionnement de l'aspirateur à mucosités après chaque changement de tubulure.