


	<h1>Garrot tourniquet</h1>	Création : Mars 2021
	Fiche matériel	Mise à jour Février 2023

## INDICATIONS

- L'utilisation du garrot tourniquet est indiquée lorsque la compression directe est inefficace ou impossible (la victime présente de nombreuses lésions, plusieurs victimes, plaie inaccessible, présence d'un corps étranger) ou lors de situations particulières (catastrophes, théâtres d'opérations militaires ou situations apparentées, situation d'isolement).
- Il doit être posé uniquement sur un membre supérieur ou inférieur



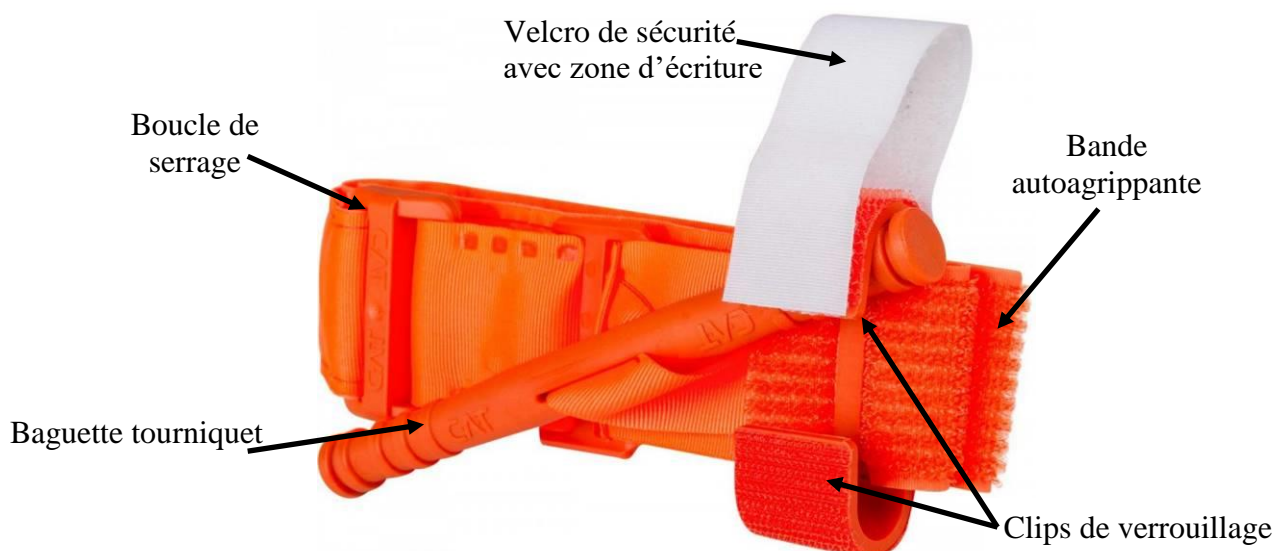

## PRESENTATION





## RISQUES ET CONTRAINTES

- Ne pas positionner le garrot tourniquet sur une articulation.
- Ne convient pas aux jeunes enfants ou nourrissons (ou lorsque le diamètre de membre est < 6 cm environ) : dans ce cas utiliser un garrot improvisé.
- Une fois posé, le garrot ne doit être desserré que sur l'ordre d'un médecin.

## REALISATION

		<p>Positionner le garrot tourniquet à quelques centimètres de la plaie, entre la plaie et la racine du membre.</p>
		<p>Placer la bande autoagrippante autour du membre puis dans la boucle de serrage (en cas d'impossibilité à insérer le garrot par une des extrémités (main/pied)) Tirer fermement la sangle autour du membre Utiliser le velcro pour fixer la bande autoagrippante.</p>
		<p>Tourner la baguette tourniquet jusqu'à ce que le saignement s'arrête</p>
		<p>Bloquer la baguette tourniquet en l'insérant dans les clips de verrouillage</p>



	<p>Fixer la sangle autoagrippante.</p> <p>Si la longueur de la bande le permet, faire le tour de la baguette tourniquet, et repasser le scratch dans les clips de verrouillage.</p>
	<p>Rabattre le velcro de sécurité et noter l'heure</p>

En cas de reprise du saignement, resserrer le garrot tourniquet.

Si ce n'est pas suffisant, compléter par un second garrot tourniquet entre le premier et la racine du membre. Si possible, poser le garrot tourniquet dans le sens de serrage opposé au 1<sup>er</sup> garrot tourniquet.



Si le saignement reste actif, procéder à la pose d'une bande imbibée de substance hémostatique associée à un pansement compressif.



## CAS PARTICULIER

Si la source de l'hémorragie n'est pas visible, afin de ne pas retarder l'arrêt du saignement :

	<p>Poser un garrot tourniquet à la racine du membre</p>
	<p>Une fois la source de l'hémorragie identifiée et accessible, poser un garrot tourniquet au-dessus de la plaie Enlever le garrot tourniquet posé à la racine du membre</p>

## ENTRETIEN/MAINTENANCE

- Matériel à usage unique

## CRITERES D'EFFICACITE

- Arrêt complet et permanent du saignement