


CO TESTEUR



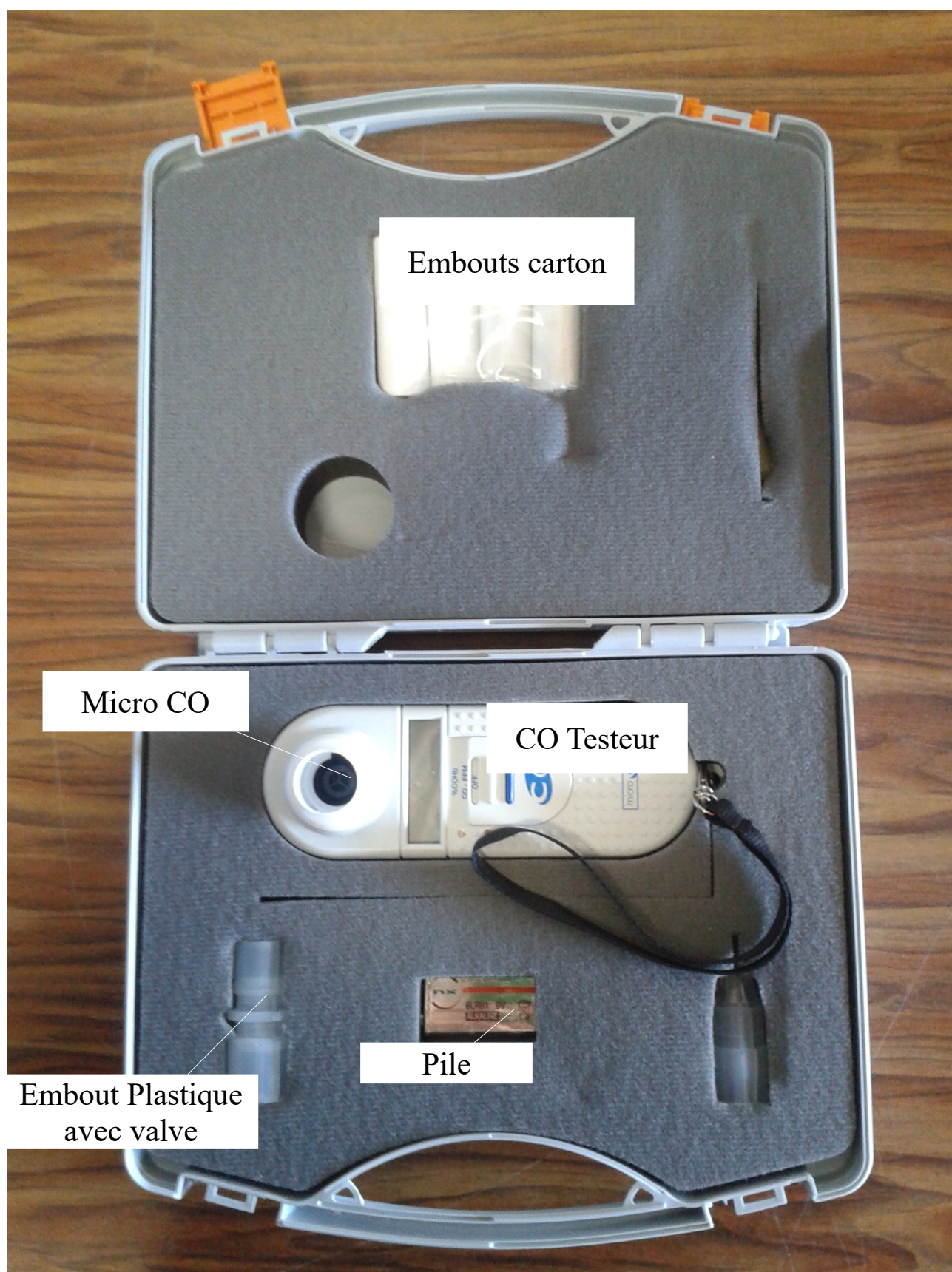

Embouts carton

Micro CO


CO Testeur

Embout Plastique
avec valve

Pile




Étape n°1
Installer la pile puis
insérer l'embout
plastique sur le micro
CO.

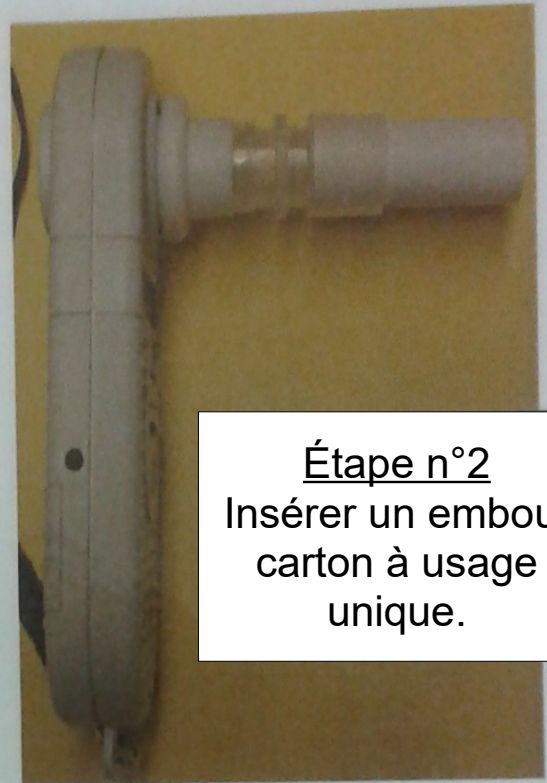

Étape n°2
Insérer un embout
carton à usage
unique.



Étape n° 3
Mettre en marche en
sélectionnant CO-PPM
ou %COHb.

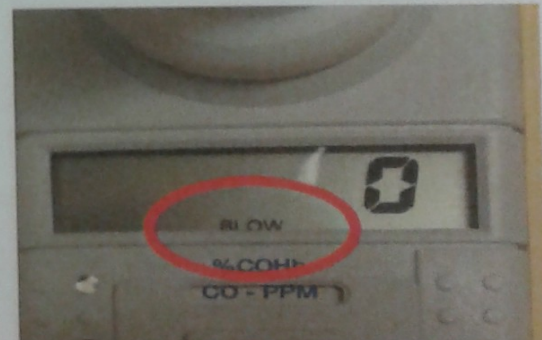

Étape n°4
lattendre que l'écran
affiche "BLOW" puis
faire souffler le patient
très lentement et
profondément.

ENTRE CHAQUE PATIENT **ET CHAQUE LECTURE**

- Ôter l'embout carton et l'embout plastique (piéteur)
- Jeter l'embout carton
- Conserver l'embout plastique (piéteur)

SI D'AUTRES MESURE SONT À RÉALISER

- Éteindre et laisser l'appareil à l'air ambiant au moins une minute pour son rééquilibrage
- Replacer l'embout plastique (piéteur)
- Placer un nouvel embout carton

HYGIÈNE

- Pour chaque test, utiliser un nouvel embout carton à usage unique
- Laver fréquemment le piéteur (solution désinfectante puis eau courante)
- Le CO Testeur et l'intérieur de la buse seront nettoyés sans aucun produit avec une lingette sèche.

LECTURE DES VALEURS **AFFICHEES**

Stades	CO-PPM	% COHb	Conclusions	Indicateur
1	0 > 5	0 > 0,8	tabagisme nul ou faible	Vert
2	6 > 10	1 > 1,6	tabagisme modéré	Jaune
3	11 > 72	1,8 > 12	tabagisme important	rouge
4	> 72	> 12	Empoisonnement soupçonné	Alarme sonore + rouge

Les stades 1,2, et 3 sont données à titre indicatif. Seul le stade 4 nous concerne en intervention.

Si celui-ci atteint et que la valeur dépasse 72 ppm ou 12% de COHb, une petite alarme retentira.

L'empoisonnement au CO devra alors être envisagé et recherché.