

Le drap de glisse

Dans quel cas les utiliser ? :



Pour le transfert d'une victime : de son lit au brancard, d'un brancard à l'autre, etc.

- Le drap de glisse s'utilise chez une victime non traumatisée.
- Si le transport est effectué en laissant le drap de glisse : bien sangler la victime au brancard (risque de glissement).
- Le drap dans le bon sens (étiquette à l'extérieur) favorise la glisse.

Mode d'emploi



Engagement du drap

Positionner le drap de glisse sous la victime :
- Basculer la victime sur le côté,
- Mettre la moitié du drap de glisse à plat sous la personne ou sous le drap sur lequel elle se trouve, l'autre moitié reposant sur le brancard,



Avant le transfert



Glisser la victime sur le brancard

- Prendre le drap et faire glisser la victime sur le brancard ou « pousser/tirer » la victime en direction de l'autre brancard,



Le pousser-tirer



Retirer le drap

- Le drap de glisse se retrouvera entre les deux draps, vous pouvez le laisser pendant le transport afin de faire la manipulation inverse aux urgences.

Une fois la victime mise sur le brancard des urgences, récupérer le drap.

Observations :

- Le drap de glisse se nettoie de la même façon que les couvertures bactériostatiques
- Ne pas tirer sur le drap directement au risque de le déchirer
- Le drap de glisse peut aussi s'utiliser afin de faire pivoter une victime en position assise.